


Instructions for use:

1. Twist and pull off the lancet cap.

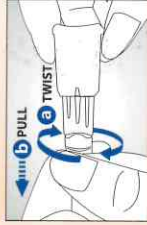

2. Select the desired penetration depth you require by turning the depth adjuster. The lancet is pre-set at 1.8 mm.

2. Selezionare la profondità di penetrazione desiderata ruotando il regolatore di penetrazione. La lancetta pungidito è impostata a mm 1,8.


Depth settings:

- || Low depth (1.3 mm)
- || Medium depth (1.8 mm)
- || High depth (2.3 mm)

Impostazione penetrazione:

- || Penetrazione bassa (1,3 mm)
- || Penetrazione media (1,8 mm)
- || Penetrazione profonda (2,3 mm)

3. Press the lancet body firmly against chosen site to activate the device.

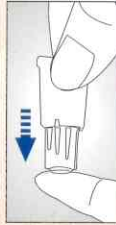

3. Per attivare il dispositivo premere con decisione sul sito prescelto.

4. Dispose of in a suitable sharps container.



4. Smaltire nell'apposito contenitore per oggetti acuminati e taglienti.

Istruzioni per l'uso:

1. Svitare e rimuovere il cappuccio protettivo.

Warning: Do not use if lancet cap has been previously removed from lancet. Discard used lancet into a sharps container in accordance with facility guidelines, national and state regulations.

Attenzione: Non utilizzare se sprovvisto di cappuccio protettivo. Smaltire le lancette pungidito in apposito contenitore per oggetti acuminati e taglienti secondo le disposizioni locali e nazionali.